

CRYOTHERAPIE HERUITGEVONDEN

Het toonaangevende, eenvoudige apparaat voor het snel en effectief verwijderen van alle goedaardige huidletsels, zonder beschadiging van gezond weefsel.



geen pijn
geen stress
geen schade

Toonaangevende cryotherapie

- krachtige, precieze tool
- betere behandelingen
- betere resultaten



GECONTROLEERDE Vernietiging
van ongewenst weefsel door het zeer
precies aanbrengen van extreme koude.

DE ULTIEME TOOL VOOR OPPERVLAKKIGE HUIDAANDOENINGEN

- **SOFT FREEZE** – snelle genezing
- **HIGH PRESSURE** – 55-bar microjet (45 micrometer = 0,045 mm)
- **LOW TEMPERATURE** – temperatuur van 79°C in het weefsel
- **5 SECONDS PER MM DEPTH** – weefselnecrose in slechts enkele seconden
- **SHARP, PRECISE JET** – microfijne tips voor precisie tot op de millimeter



Meer kracht = hogere snelheid
10-20 seconden per behandeling

BETERE BEHANDELINGEN

Trauma-vrije behandeling
Fantastisch voor patiënten



BETER VOOR PATIËNTEN


Verwijder het letsel – en het trauma!



- **GEEN PIJN** – lichte tinteling wanneer het gezonde weefsel is bereikt, signaal dat de behandeling voldoende was
- **GEEN STRESS** – Behandeling is precies en snel, en over in één sessie
- **GEEN LITTEKENS OF PIGMENTATIE** – gezond weefsel is onaangetast, bevroren weefsel verdwijnt in 1 tot 2 weken



DE KRACHT VAN CRYOTHERAPIE

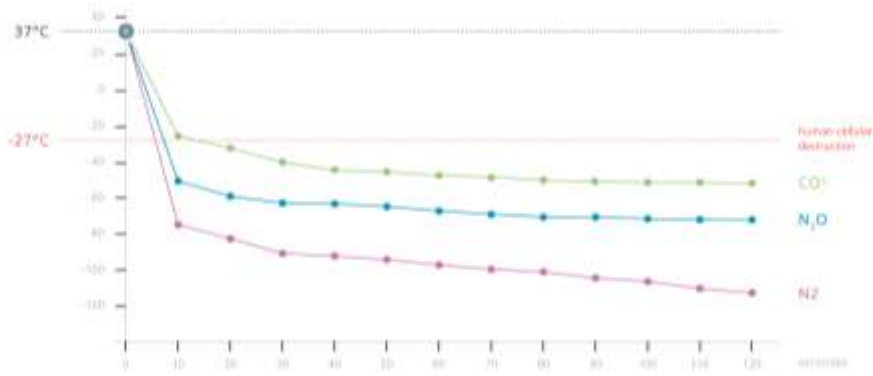


- Cryonecrosis at -27°C or lower produces necrosis in all benign human tissue. Accurett delivers constant jet of -79°C .
- Freeze-thaw, freeze-thaw; Two rapid freezes at -27°C in quick succession destroy cells successfully. Second freeze ensures that no cells are preserved instead of destroyed.

Freezing rates almost identical. In-tissue temperature at a desired -30°C and more in 5-7 seconds.

EFFECTIEVE CRYONECROSE

Snelle bevrozing tot -27°C en meer zal cryonecrose veroorzaken in al het goedaardig weefsel

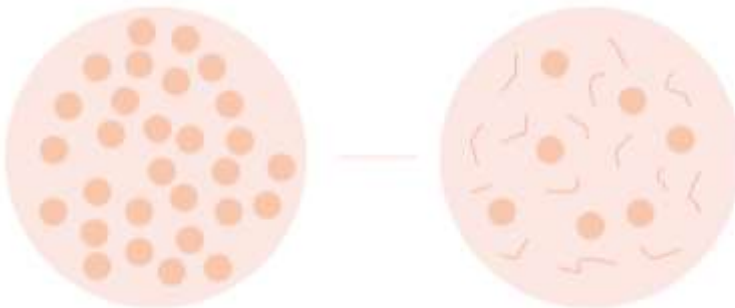


Waarom een tweede bevrozing?

Bij trage bevrozing worden kleine stekelachtige stukjes extracellulair ijs gevormd, die isolatie van de cellen kunnen veroorzaken waardoor de huidige toestand wordt behouden in plaats van het gewenste resultaat te geven.


BEHANDELING IN EEN SESSIE

- Snelle genezing zonder littekens
- Geen trauma, niet fysiek, noch mentaal
- Geen snijwondes, bloedingen, risico's op infecties, hechtingen of opvolgbehandelingen

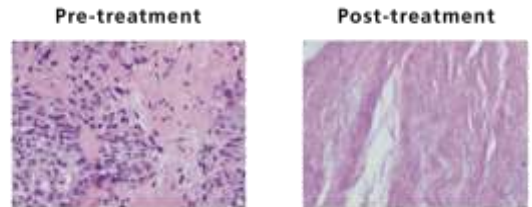

IDEAAL VOOR HET BEHANDELEN VAN:

- Pigmentvlekken
- Ouderdomsvlekken
- Solar Lentigo
- Skin Tags

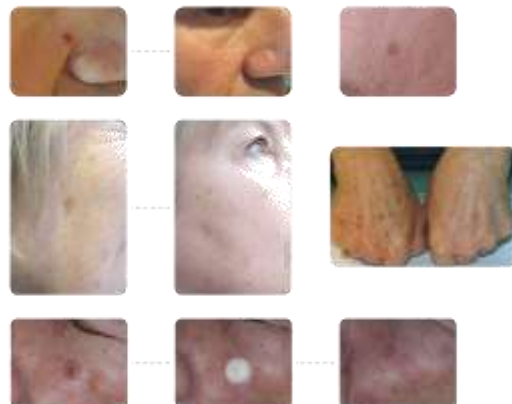

MOGEN BEHANDELD WORDEN

